

प्रत्येक पंकमध्ये समाविष्ट आहे:

- एक चाचणी उपकरण (कार्ड)
- एक दिस्पोजेबल ड्रॉपर
- आद्रेता रोखन्या साठी सीलीका जेल

लघवीचा नमुना घेण्यासाठी क्रम:

- लघवीचा नमुना असून स्वच्छ आणि कोरक्या कंटेनरमध्ये गोळा केला पाहिजे.
- गर्धारणेच निदान अधिकतम होण्यासाठी, सकाळीची पढिली लघवी शक्यतो घावी. परंतु दिवसा कोणत्याही वेळीही आपाची चाचणी करू शकता परतु लघवीचा नमुना घेण्यासूरी किमान चार तास आधी लघवी धरून ठेवण्याची खात्री करावी.

प्रेग न्यूज टेस्ट किट वापरण्यासाठी

- आपण चाचणी सुरु करायासूरीच याक्रमधून उपकरण घेऊ आणि उपकरण एका सपाट पृष्ठभागावर ठेवा (चाचणी उपकरण अधिक काळपर्यंत उधके ठेवू नका.)
- चाचणी उपकरणावर एक ठळक अक्षरात "D" (संपैल वेळा) आणि एक निर्क्षर विंडो "C" (कंट्रोल विंडो) आणि "T" (टेस्ट विंडो) आहेत.
- दिस्पोजेबल ड्रॉपरया मदतीने कंटेनरमध्ये लघवीचा नमुना गोळा करा.
- "S" (संपैल वेळा) मध्ये लघवीच्या नमुन्याचे अचूक 3 थेंब टाका चाचणी उपकरणाच्या कोणत्याही अच्या भागाशी, तसेच "T" किंवा "T" खुण असलेल्या विद्योमध्ये लघवीचा नमुना टाकू ठेवा.
- ही चाचणी करत असताना चाचणी उपकरण पंखा किंवा हवेच्या प्रवाहापासून दूर ठेवा.

निष्कर्षाचा अर्थ:

- रेषा दिसून घेण्यासाठी रिझल्ट खंडिलो पाहा आणि 5 मिनिटांचा अत निष्कर्षाचा अर्थ सांगीतप्रमाणे लावा:
- अ) पॉजिटिव: दोन गुलाबी रेखा, एक C इथे आणि एक T इथे
- ब) निगेटिव: C इथे एक गुलाबी रेखा
- क) अवैध T इथे एक गुलाबी रेखा, चाचणी पुन्हा करावी.
- द) अवैध कोणतीही गुलाबी रेखा नाही. चाचणी पुन्हा करावी.
- चाचणीचा निष्कर्ष 5 मिनिटांनंतर निष्कर्षाचा अर्थ लावू नका. 5 मिनिटांनंतर चाचणी रेखा दिसायाचा कोणताही उपयोग नाही. आणखी पुन्हा करायासाठी, वरील चाचणी तात्या नमुन्याद्वारे आणि नवीन चाचणी उपकरणाद्वारे 24 तासांनी करावी.
- सर्वोत्तम निष्कर्षासाठी, पाणी चुकल्याच्या दिवशी किंवा नंतर चाचणी करावी.
- चाचणी निगेटिव असेल तर, पाणीचे गणित चुकले असण्याची शक्यता आहे. एक अठवडापर वाट पाहा आणि चाचणी पुन्हा करा.
- लघवीचा नमुना घेण्यासूरी भर्यारू प्रमाणाणा द्रवपदार्थ पिल्यापुक्त लघवीमध्यां होमान स्तर पातल होऊ शकतात त्यापुक्त चाचणी निष्कर्ष चुकीचे निष्पू शकतात.
- रुग्णाचा एडोक्रायोनॉटींजी उपचार सुरु करण्यासूरी अच्या पद्धतीने गर्फाण्याची पुन्हा करा.
- वंयांत्रराशीची HCG असलेल्या औषधांमुळे चाचणीच्या निष्कर्मध्ये हस्तक्षेप होऊ शकतो.
- सर्व निदानात्मक चाचणांप्रमाणे, गर्भाधारणीची पुन्हा करण्यांने निदान केवळ एका पात्र स्त्रीरोग तजाद्वारेच करण्यात याची.

प्रेग न्यूज किटची उपकरणाची वर्णना:

- एक चाचणी उपकरण (कार्ड)
- एक दिस्पोजेबल ड्रॉपर
- सीलीका जेल डिस्ट्रिब्युटर

मुात्रांचा वापर करत करावीचे विधान:

- मुात्रांचा झालेला परिस्थितीचा वर्णन मरीच्या पाही करून निर्देश वाचावी.
- गर्ड्यू लाईल्ड हल्लु अतुंगिक डिस्ट्रिब्युटर किऱत तेजीचे मुात्रांचा अपेक्षित मौलिकी तातेवर निर्देश वाचावी. अमांवा गोळा, अल्पान्यांना तंत्रावारी किमान चार शकता परतु लघवीचा नमुना घेण्यासूरी किमान चार तास आधी लघवी धरून ठेवण्याची खात्री करावी.

प्रेग न्यूज टेस्ट किट वापरण्यासाठी

- आपण चाचणी सुरु करायासूरीचे पाक्रमधून उपकरण घेऊ आणि उपकरण एका सपाट पृष्ठभागावर ठेवा (चाचणी उपकरण अधिक काळपर्यंत उधके ठेवू नका.)
- चाचणी उपकरणावर एक ठळक अक्षरात "D" (संपैल वेळा) आणि एक निर्क्षर विंडो "C" (कंट्रोल विंडो) आणि "T" (टेस्ट विंडो) आहेत.
- दिस्पोजेबल ड्रॉपरया मदतीने कंटेनरमध्ये लघवीचा नमुना गोळा करा.
- "S" (संपैल वेळा) मध्ये लघवीच्या नमुन्याचे अचूक 3 थेंब टाका चाचणी उपकरणाच्या कोणत्याही अच्या भागाशी, तसेच "T" किंवा "T" खुण असलेल्या विद्योमध्ये लघवीचा नमुना टाकू ठेवा.
- ही चाचणी करत असताना चाचणी उपकरण पंखा किंवा हवेच्या प्रवाहापासून दूर ठेवा.

रिषेल्टेटेल उपलब्ध केंद्रांची वर्णना:

- रिषेल्टेटेल निर्देश देण्याची वर्णन करावी. एक चाचणी उपकरणीला 5 निमुक्तांचा असेल तर, वर्णन करावी.
- ए) वाळीची: रिषेल्टेटेल, एकल ड्रॉपर, एकी C वर्ण करावी
- ब) निरिविल: एक फॅंड ड्रॉपर, C वर्ण करावी
- स) जिलिपाल: T वर्ण करावी वॉटर प्रॉफ. वर्षेकरीक वॉटर प्रॉफ वेल्वेटीची जिलिपाल
- द) फॅंड ड्रॉपर, एकल ड्रॉपर, एकी C वर्ण करावी
- १ रिषेल्टेटेल निर्देश देण्याची वर्णन करावी.
- २ एक चाचणी उपकरणीला तेजीचा वर्णन करावी.
- ३ एक ड्रॉपर किट किटिंग करावी.
- ४ एक ड्रॉपर किट किटिंग करावी.
- ५ एक ड्रॉपर किट किटिंग करावी.

प्रेग न्यूज किटची उपकरणाची वर्णना:

- एक चाचणी उपकरण (कार्ड)
- एक डिस्पोजेबल ड्रॉपर
- सीलीका जेल डिस्ट्रिब्युटर

चाचणीचा नमुना घेण्यासाठी क्रम:

- मुात्रांचा झालेला परिस्थितीचा वर्णन मरीच्या पाही करून निर्देश वाचावी.
- गर्ड्यू लाईल्ड हल्लु अतुंगिक डिस्ट्रिब्युटर किऱत तेजीचे मुात्रांचा अपेक्षित मौलिकी तातेवर निर्देश वाचावी. अमांवा गोळा, अल्पान्यांना तंत्रावारी किमान चार शकता परतु लघवीचा नमुना घेण्यासूरी किमान चार तास आधी लघवी धरून ठेवण्याची खात्री करावी.

चिन्हिनी कांमविळ चेक किटची उपकरणाची वर्णना:

- प्रेग न्यूज किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट

चिन्हिनी कांमविळ उपकरणाची वर्णना:

- प्रेग न्यूज किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट

चिन्हिनी कांमविळ उपकरणाची वर्णना:

- प्रेग न्यूज किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट

प्रेग न्यूज किटची उपकरणाची वर्णना:

- प्रेग न्यूज किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट

प्रेग न्यूज किटची उपकरणाची वर्णना:

- प्रेग न्यूज किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट

प्रेग न्यूज किटची उपकरणाची वर्णना:

- प्रेग न्यूज किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट

प्रेग न्यूज किटची उपकरणाची वर्णना:

- प्रेग न्यूज किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट
- चाचणी किट

